


**Инструкция по эксплуатации**  
**Система вызова помощи для инвалидов Комплект №1 арт. ТБ-60**

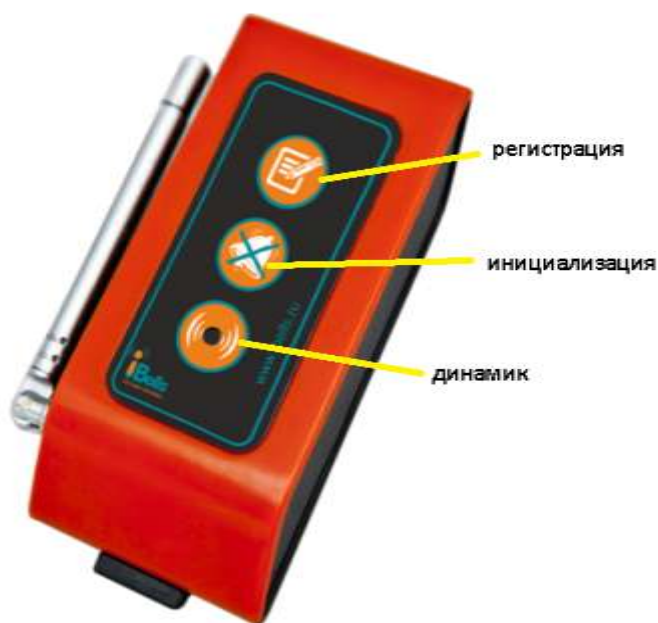

1. **Инициализация пейджера** (сброс к заводским установкам): нажимайте и удерживайте кнопку «инициализация» более 4 секунд пока не загорится индикатор. Затем отпустите кнопку, когда индикатор погаснет, инициализация завершена.
2. **Регистрация:**
  - А. Нажмите и удерживайте кнопку «регистрация» более 4 секунд пока не загорится индикатор. Затем отпустите кнопку «регистрация».
  - В. Нажмите кнопку вызова, которую необходимо запрограммировать. Индикатор мигнет, это означает, что регистрация кнопки завершена успешно.
  - С. Нажмите и удерживайте кнопку «регистрация» более 4 секунд пока не индикатор не потухнет. Затем отпустите кнопку «регистрация». Регистрация завершена, пейджер готов к работе.

\*Пояснение: Если кнопка уже «привязана», то индикатор не будет мигать. Можно привязать до 10 кнопок вызова.

Для лучшего приема рекомендуется выдвинуть антенну и держать ее вертикально вверх.

Примечание: не допускайте соприкосновения антенны с металлическими предметами и проводами.

3. **Вызов:**

В режиме ожидания, при нажатии на кнопку вызова, произойдет звуковое оповещение сопровождаемое миганием индикации. Нажимайте кнопку «регистрация» для отмены вызова. Вызов длится 15 секунд.